

## GEBRAUCHSANWEISUNG - BLIDENTASTSTOCK



**LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG UND DIE INFORMATIONEN AUF DEM HÄNGEETIKETT IHRES GEHSTOCKES VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF!**

### 1. VERWENDUNGSZWECK

Unserer Blindentaststock dient als Orientierungs-, Wahrnehmungs- und Fortbewegungshilfe für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung oder Blindheit. Der Blindenstock erfüllt zwei Aufgaben. Zum einen unterstützt er Sie zuverlässig als offiziell anerkanntes Hilfsmittel unter Anwendung diverser Nutzungstechniken bei der Orientierung im Nahbereich. Zum anderen schließt er Sie zusätzlich laut Straßenverkehrsordnung aus dem Vertrauensgrundsatz aus (§ 2 StVO). Er entspricht somit den Anforderungen an das gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschutzzeichen.

### 2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Unserer Blindentaststock zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- eine hohe Belastbarkeit
- besteht aus hochwertigem Leichtmetall
- ist 4-fach faltbar und daher leicht zu verstauen
- besitzt einen handsympathischen Moosgummi-Griff
- sind speziell für Menschen mit Sehbehinderung gefertigt
- entspricht den Richtlinien 93/42/EWG des Medizinproduktegesetzes
- außerdem ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13485 zertifiziert.




### 3. SICHERHEITSHINWEISE UND BENUTZUNG

Damit Sie sich mit Ihrem Blindentaststock in der Hand jederzeit sicher fühlen, empfehlen wir Ihnen, sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung des Blindentaststock einweisen und die funktionsgerechten und ergonomisch richtigen Einstellungen vornehmen zu lassen.


Außerdem beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- es dürfen keine Taschen, Beutel oder sonstige Gegenstände an den Blindentaststock gehängt werden! (**Abb. A**)
- es dürfen keine mechanischen Veränderungen an den Blindentaststöcken vorgenommen werden, da wir aus Haftungsgründen dann keine Sicherheit mehr für die Gehstöcke gewährleisten können! Aus diesem Grund dürfen nur Originalersatzteile und Originalzubehör verwendet werden!
- Blindentaststöcke sind Gehhilfen und dürfen keinesfalls zweckentfremdet werden, zum Beispiel zum Hebeln oder Versetzen von Möbeln! (**Abb. B**)
- Blindentaststöcke dürfen nicht als Schaltheife für den Lichtschalter oder Fahrstuhlknöpfe missbraucht werden!
- die Kunststoffkappe am Fuß Ihres Blindentaststockes ist ein Verschleißteil und darf nicht zu stark abgenutzt sein! Bei starken Abnutzungserscheinungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder das Krankenpersonal, damit diese die Kunststoffkappe rechtzeitig austauschen können!
- die Griffigkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt des Blindentaststockes entscheidend!
- achten Sie auf Unebenheiten oder Löcher im Boden, da der Blindentaststock dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann!
- besondere Vorsicht gilt bei schlechten/ungenügenden Lichtverhältnissen, da dann Unregelmäßigkeiten im Untergrund nur schlecht oder gar nicht erkennbar sind!

**Abb. A**

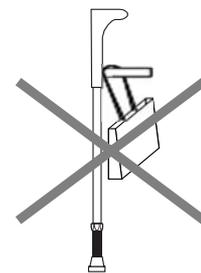

**Abb. "B"**

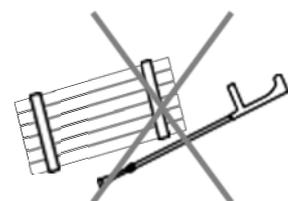

## GEBRAUCHSANWEISUNG - BLIDENTASTSTOCK

- seien Sie äußerst vorsichtig bei nassem oder vereistem Untergrund, selbst feuchte Fliesen bergen eine ungeahnte Gefahr des Wegrutschens!
- meiden Sie Schnee- oder Eisflächen mit Ihrem Blindentaststockes
- überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alle Rohrsegmente und Verschraubungen fest ineinandergesteckt bzw. fest angezogen sind!
- bei äußerlich sichtbaren Beschädigungen Ihres Blindentaststockes fragen Sie Ihren Fachhändler oder das Pflegepersonal! Das Richten z. B. eines verbogenen Blindentaststockes ist ausdrücklich untersagt (Bruchgefahr)!
- sollten Sie doch einmal stürzen: lassen Sie den Blindentaststock möglichst seitlich fallen, damit Sie nicht auf den Blindentaststock fallen!
- die richtige Handhabung der Blindentaststöcke benötigt anfangs etwas Übung. Wir empfehlen, je nach Möglichkeit, sich deshalb am Anfang durch eine Hilfsperson zusätzlich begleiten und stützen zu lassen
- lagern Sie den Blindentaststock nicht in der Nähe starker Temperatureinwirkungen! Verletzungsgefahr besteht bei starker Überhitzung oder Unterkühlung des Blindentaststock (z. B. bei starker Sonneneinstrahlung an Fenstern und Autoscheiben, an Heizkörpern, in der Sauna oder bei Gefrieren), die zulässige Umgebungstemperatur bei Benutzung liegt zwischen  $-15^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$ !
- Blindentaststöcke dürfen nicht im Wasser benutzt werden. Das eindringende Wasser in das Rohr (Edelstahl, Leichtmetall und Carbon) führt zum Durchrosten oder oxidieren des Rohres, was eine erhöhte Bruchgefahr bedeuten kann. Dauerhafter Kontakt der Gehhilfe mit Feuchtigkeit ist zu vermeiden. Bei Feuchtigkeit sind die Blindentaststöcke entsprechend zu trocken
- Sie benötigen Blindentaststöcke, weil Ihre übliche Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Obwohl Ihnen der Blindentaststock in dieser Situation hilft, bleibt Ihre Sehfähigkeit dennoch eingeschränkt! Halten Sie sich diesen Umstand dauernd vor Augen und lassen Sie bei der Benutzung der Blindentaststöcke besondere Vorsicht walten!

### 4. LAGERUNG UND PFLEGE

- lagern Sie die Blindentaststöcke niemals in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen, Heizungen oder im KFZ auf der Ablage! Blindentaststöcke nicht über einen längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen! Starke Sonne oder Hitze zerstören den Kunststoff!
- schützen Sie Ihre Blindentaststöcke vor dem Umfallen und vor Lackschäden! (Stockschlaufen verwenden!)
- Verschleißteile wie z. B. die Kunststoffkappe müssen regelmäßig ausgetauscht werden! Achten Sie unbedingt auf die richtige Größe, festen Sitz.
- Blindentaststöcke dürfen nach einer längeren Zeit der Nichtbenutzung nur nach vorheriger Prüfung durch das Fachpersonal wiederverwendet werden!
- Reinigen Sie die Blindentaststöcke bei Verschmutzung nur mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Lappen!
- **WARNUNG!!** Griffe und Kunststoffkappe niemals mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! (**Abb. C**)
- **HINWEIS!** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden! Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!



### 5. VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- verbogene oder beschädigte Blindentaststöcke dürfen keinesfalls weiterverwendet werden, da sie keine erforderliche Stabilität mehr bieten!
- aufgrund der Bruchgefahr dürfen verbogene Blindentaststöcke auch nicht gerichtet werden! Wenden Sie sich in diesem Fall zwecks Ersatzbeschaffung an Ihren Fachhändler!



## GEBRAUCHSANWEISUNG - BLIDENTASTSTOCK

### 6. WIEDEREINSATZ (VERLEIH) / EINSATZDAUER

Wir übernehmen die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz nur für das erstmalige in-Verkehr-bringen unserer Blindentaststöcke! Einem Wiedereinsatz stimmen wir nur zu, wenn der Gehstock zuvor von uns geprüft wurde.

Die Lebensdauer der Blindentaststöcke ist begrenzt auf 2 Jahre. Über diesen Zeitpunkt hinaus liegt die weitere Benutzung der Blindentaststöcke im Verantwortungsbereich des Benutzers.

### 7. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Blindentaststöcke, Zubehör und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

### 8. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen!

Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten! Für Schäden, die durch die Veränderung an unseren Gehstöcken entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen!

Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen).

Für das gesamte Sortiment der GASTROCK-Produkte stehen Originalersatzteil und Zubehör zur Verfügung! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

### 9. TECHNISCHE DATEN

Allgemeine- und technische Blindentaststock-informationen entnehmen Sie bitte dem Hängeetikett an Ihrem Gehstock!