

GEBRAUCHSANWEISUNG - EISKRALLE



LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF!

1. VERWENDUNGSZWECK

Die Eiskralle ist ein zusätzliches Hilfsmittel für Gehstöcke aus Holz, Leichtmetall und Carbon und dient als sicherer Gleitschutz bei Schnee- und Eisglätte.

2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Unsere Eiskralle zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- eine hohe Belastbarkeit
- bestehen aus hochwertigem Edelstahl
- sie ist leicht zu montieren
- ist klappbar, so können Sie Ihren Gehstock schnell wieder zum normalen Gehstock umfunktionieren
- besitzt eine 5-Dorn Spitze für bestmöglichen halt Ihres Gehstockes bei Schnee- und Eisglätte
- außerdem ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13485 zertifiziert



3. SICHERHEITSHINWEISE & BENUTZUNG

Damit Sie sich mit Ihrer Eiskralle am Gehstock auch wirklich sicher fühlen und diese auch korrekt montiert ist, empfehlen wir Ihnen, sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Montage und die Benutzung sowie die funktionsgerechten Einstellungen vornehmen zu lassen.


Außerdem beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung Ihrer Gehhilfe von dem festen Sitz der Eiskralle!
- Aufgrund des Anwendungszwecks ist die Eiskralle spitz und scharfkantig. Es besteht daher Verletzungsgefahr. Seien Sie daher auch vorsichtig bei der Reinigung!
- Wenn die Eiskralle montiert ist, ist die Gehhilfe mit besonderer Vorsicht zu verwenden, da durch die Eiskralle bei unvorsichtigem Verhalten andere Personen verletzt werden oder Gegenstände beschädigt werden können.
- Achten Sie darauf, dass die Eiskralle nach der Betätigung des Klappmechanismus sicher einrastet.
- Verwenden Sie die Eiskralle nur bei Eis oder Schnee und im Freien, und niemals auf empfindlichen Fußböden!
- Sollten Sie die Eiskralle längere Zeit nicht benötigen, empfiehlt sich die Demontage von Ihrem Gehstock, um Verletzungen an den Metallkronen zu vermeiden!
- Beachten Sie unbedingt die Montageanleitung!

4. MONTAGEANLEITUNG

Gehen Sie bei der Montage Ihrer Eiskralle wie folgt vor:

- Lösen Sie die beiden Schrauben an der Befestigungsschelle (siehe Abbildung „A“).
- Schieben Sie die Eiskralle mit den Metallspitzen nach unten zeigend auf das untere Ende Ihres Gehstockes, bis sie anstößt.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Die beiden Schrauben gewährleisten einen sicheren Halt der Eiskralle an jedem Gehstock.
- Wird die Eiskralle nicht mehr benötigt, drücken Sie zunächst mit Daumen und Zeigefinger die beiden weißen Kunststoffköpfe zusammen (siehe Abbildung „B“). Klappen Sie die Eiskralle nach oben, so dass die Spitzen in die Luft zeigen (siehe Abbildung).
- Wollen Sie die Eiskralle wieder benutzen, betätigen Sie die Kunststoffköpfe wie in Punkt 4 und klappen die Eiskralle wieder nach unten.

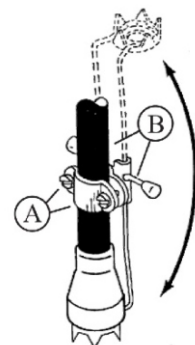

Hinweis: Für Gehstöcke mit einem größeren Durchmesser liegen der Eiskralle zwei längere Schrauben bei. Diese müssen nur gegen die kurzen, bereits in der Halterung befindlichen Schrauben ausgetauscht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG - EISKRALLE

5. LAGERUNG UND PFLEGE

- lagern Sie die Eiskralle fern von Witterungseinflüssen
- Reinigen Sie die Eiskralle bei Verschmutzung nur mit Wasser und einem Lappen!
- **WARNUNG!!** Eiskralle niemals mit öligen Substanzen reinigen! Rutschgefahr! (siehe **Abbildung**)
- **HINWEIS!** Die Eiskralle ist Wartungsfrei!



6. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Eiskralen, Zubehör und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

7. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen!

Es ist zu beachten, dass für unsere Anfertigungen, insbesondere Sonderanfertigungen, verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten! Für Schäden, die durch die Veränderung an unseren Gehstöcken entstanden sind, können wir keine Haftung übernehmen!

Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.)

Für das gesamte Sortiment der GASTROCK-Produkte stehen Originalersatzteil und Zubehör zur Verfügung! Für Ersatzteile, Zubehör und Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

8. TECHNISCHE DATEN

Klappbare Eiskralle aus Edelstahl mit 5-Dorn-Spitze