

GEBRAUCHSANWEISUNG – RUTSCHBRETT



LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF!

1. VERWENDUNGSZWECK

Das Rutschbrett dient zum Umsetzen eines Patienten von Sitz zu Sitz, z. B. in den Rollstuhl, auf die Toilette oder den Autositz. Der Patient muss nicht mehr aufstehen, sondern kann sitzend selbstständig oder mit Unterstützung des Pflegepersonals den Positionswechsel vornehmen. Es eignet sich auch in Fällen, in denen kleine Höhenunterschiede zu überwinden sind.

2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Unsere Gehstöcke zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus:

- eine hohe Belastbarkeit
- einfaches Handling
- auch ohne Mithilfe anwendbar
- komplett aus Holz
- bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG des Medizinproduktegesetzes.
- außerdem ist unser Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001 & DIN ISO 13485 zertifiziert



3. SICHERHEITSHINWEISE

Lassen Sie sich von Ihrem Fachpersonal in die richtige Benutzung des Rutschbretts einweisen!

Außerdem beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- der Abstand zwischen den beiden Auflageflächen sollte nicht breiter als 10 cm sein!
- zur Erhöhung der Anwendungssicherheit sollte die seitliche Aussparung zum Festklemmen des Rutschbretts am Stuhl oder Rollstuhl genutzt werden

4. LAGERUNG UND PFLEGE

- lagern Sie das Rutschbrett nicht in feuchten Räumen
- **HINWEIS!** Wird eine Desinfektion notwendig, ist ein geeignetes Desinfektionsmittel zu verwenden! Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

5. ENTSORGUNG

- Zum Reinigen des Rutschbretts verwenden Sie ein feuchtes Tuch (unter Zugabe handelsüblicher Reinigungs- oder Desinfektionsmittel).

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Rutschbretter und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

6. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen!

Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.)

7. TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 70,2 x 29,2 x 1,5 cm, Langloch 9,6 x 2,65 cm, seitliche Aussparung 5,5 x 9 cm